


FFP2-suojausluokan BM-026 hengityssuojain on tehty käytettäväksi ympäristöissä, joiden hengitysilmassa voi olla haitallisia ja mutageenisia hiukkasia. Hengityssuojaimet muodostavat esteen vähintään 94 prosentille yli 0,3 mikronin suuruista hiukkasista, ja niitä voidaan käyttää ympäristöissä, joissa vaaralliset aineet ylittävät OEL-arvot enintään kymmenkertaisesti. Kolmesta erilaisesta kerroksesta kuitukangasmateriaalia koostuva suodatusjärjestelmämme suojaa käyttäjää vaaditun hengityksensuojauksen lisäksi myös epämiellyttäviltä hajuilta ja hiukkasilta.

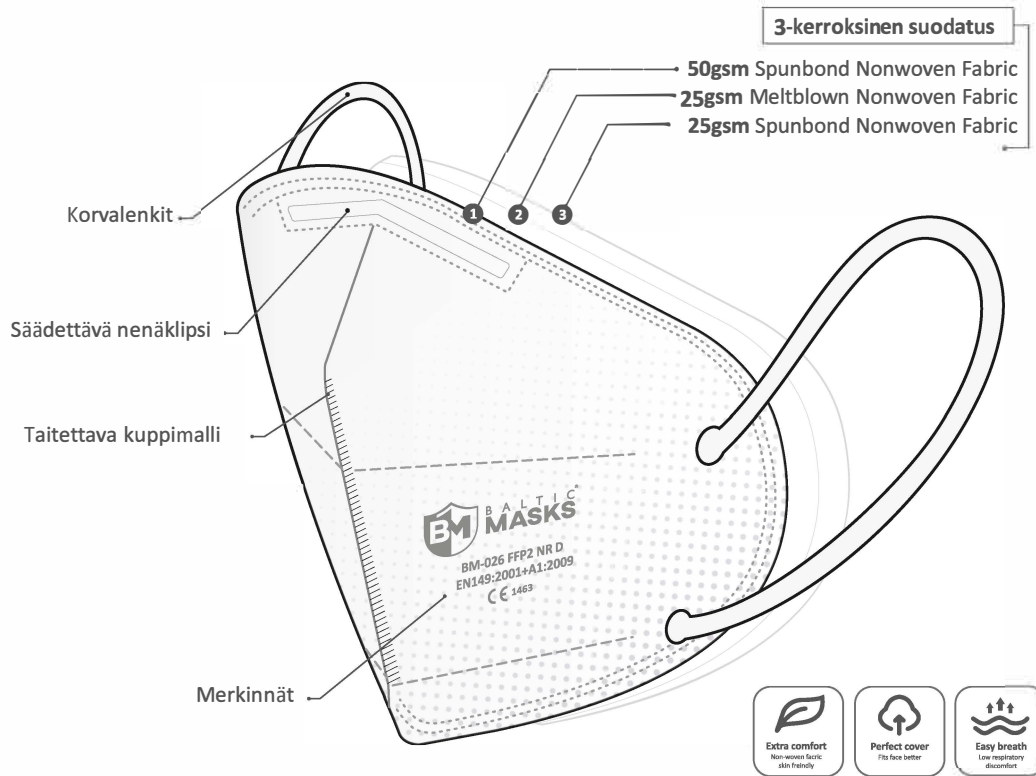

Standardit: CE 1463, EN 149:2001+A1:2009

Malli: Korvalenkit/ kiinnitys pään takaa (*sisältää kiinnitysklipsin)

Filtteröintitehokkuus: Yli 94% (Vastaa US N95 ja EU FFP2 -standardeja)

Merkinnot: PPE, FFP2 NR D, CE 1463, EN 149:2001+A1:2009

Nimitys: NR - Non reusable (= kertakäyttöinen)

Materiaalit:

1. 50gsm Spunbond Nonwoven
2. 25gsm Meltblown Nonwoven
3. 25gsm Spunbond Nonwoven

Venttiili: Ei

Säilyvyys: Kaksi vuotta valmistuksesta


Maskin paino: 3,5 g

Hävitys: Käytetyt tuotteet tulisi hävittää ongelmajätteenä kansallisten säädösten mukaisesti.

***ylimääräisenä: kiinnitysklipsi korvalenkeille**



Pakkaustiedot

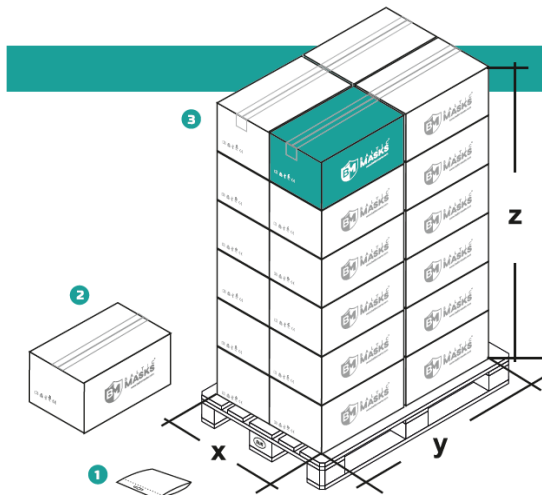

10 pcs in a polybag, 80 polybags in a carton box.

- 1 **Size:** 185mm (y) x 240mm (x) x 25mm (z)
Quantity: 1pack (10pcs.)
- 2 **Size:** 590mm (y) x 380mm (x) x 280mm (z)
Quantity: 1/80pack (800pcs.)
- 3 **Size:** 1180mm (y) x 760mm (x) x 1680mm (z)
Quantity: 24/80pack (19.200pcs.)

Säilytysolosuhteet ja säilyvyys: suodatinmaskit on säilytettävä pakkauksissaan ominaisuuksiensa säilyttämiseksi. Avaamattoman tuotteen säilyvyysaika on 2 vuotta valmistuspäivästä, kun sitä säilytetään 10°C ja +40°C asteen välillä ja alle 85% suhteellisessa kosteudessa.

FIN

BM-026 FFP2 NR D

Käyttöohjeet



Älä käytä parran tai muun kasvo-
karvoituksen kanssa. Käyttö voi estää
tiivin kontaktin hengityssuojaimen ja
ihon välillä.

Pukeutumisohteja on noudatettava joka kerta kun käytät maskia. Tarkista ennen käyttöä, ettei maskissa ole näkyviä vaurioita. Likaisia tai vaurioituneita maskeja ei saa käyttää.

1. Avaa maski sivuille käyttäen kumpaakin kättä apunasi.
2. Suorista nenäklipsi.
3. Aseta maski kasvoillesi siten, että se peittää nenän ja suun. Varmista, etteivät korvalenkit jää maskin ja kasvojesi väliin.
4. Vedä korvalenkit korviesi taakse. Säädä maskia siten, että se istuu kasvoillesi miellyttävästi.
5. **Asettele nenäklipsi siten, että se mukautuu tiiviisti nenävarteesi etkä tunne, että ilma karkaa sivuilta.**
6. **Painele maskin reunat kummallakin kädellä tiiviisti kasvojesi vasten.**



Huomio!!! Maskin hyvä istuvuus on tuotteen toimivuuden kannalta kriittistä!!!

⚠️ HUOMIO!

1. Tämä tuote ei sovellu suojaksi haitallisilta ja öljyisiltä aerosoleilta.
2. Tuote ei tuota happea eikä sovellu käytettäväksi hapettomissa ympäristöissä, vedenalaisissa toiminnoissa, evakuointi- tai palontorjuntaympäristöissä.
3. Tämän suojamaskin käyttöä ei suositella, jos et tunne maskin muodostavan tiivistä suojaa kasvojen ja maskin reunan välillä käytön aikana.
4. Jos käytön aikana havaitaan, että maski on vaurioitunut tai hengitysvastus muodostuu liian suureksi, vaihda maski uuteen.
5. Tuote on tarkoitettu kertakäyttöiseksi eikä suojusta tule käyttää uudelleen. Suositeltu käyttöaika on 4-8 tuntia.
6. On epätodennäköistä, että vaatimukset tiiviydelle täyttyvät, mikäli kasvojen karvoitus estää maskin tiiviin istuvuuden kasvoilla.

⚠️ Varoitus - tuote ei ole tulenkestävä, eikä sitä saa käyttää alueilla, joissa on avotulta.

Käytetyt materiaalit: 3 kerrosta - 1. 50gsm Spunbond Nonwoven 2. 25gsm Meltblown Nonwoven 3. 25gsm Spunbond Nonwoven

Säilytys				Pakkauskoko: 10 kpl
Temperature range of storage conditions		Humidity range of storage conditions	Protect from direct contact with water	

🏢 BALTIC MASKS, UAB Savanoriu ave. 178F, Vilnius, Lithuania

CE notified body: Polski Rejestr Statków S.A.(NB ID: 1463)

These instructions for use have been prepared in accordance with the requirements set out in the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council. [Link to the declaration of conformity and CE certificate: www.balticmasks.com](#)