


Kuinka käytät kasvomaskia



1
Pese tai desinfioi
kätesi ennen kuin
kosket maskiin

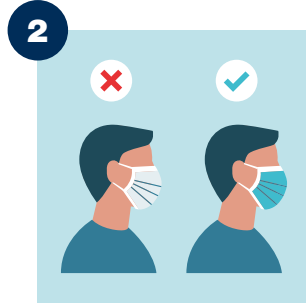

2
Varmista että maski on
oikeinpäin. Useimmiten
värillinen puoli tulee
ulospäin.



3
Aseta maski
kasvoillesi siten,
että nenävahvike
on nenäsi päällä.



4
Vedä korvalenkit
korviesi taakse.



5
Taita laskokset
kokonaan auki siten,
että maski peittää suun
ja nenän kokonaan
ilman aukkoja



6
Paina nenävahviketta
molemmiin puolin niin,
että se asettuu
nenällesi paremmin



7
Poista maski
ottamalla kiinni
korvalenkeistä. Varo
koskemasta maskin
sisäosaan.



8
Hävitä maski ja pyri
välttämään koskemasta
niin maskin sisäpintaan,
tai roskakoriin.



9
Pese tai desinfioi
kätesi.



Vältä koskemasta
maskiin käytön
aikana. Jos
kuitenkin kosket,
pese tai desinfioi
kätesi.



Vaihda maski jos
se kostuu. Älä
käytä maskia
uudestaan.